



HANDLEIDING AMBROISE FOTOMAATNAME UTX EN GENUX

Staalsteden 4-6A, 7547 TA Enschede, Nederland
tel: +31 53 4302836 | info@ambroise.nl | www.ambroise.nl

Ambroise fotomaatname UTX en GENUX OA

Aandachtspunten bij de voorbereiding van een fotomaatname



A. Vouw de poster op de zwarte lijn onder het logo op de grond/muur.



B. Meet 2m afstand van de muur.




C. Markeer de grond op 2m afstand van de vloer



D. Bepaal de anatomische knieas



E. Markeer de laterale zijde van het been, ter hoogte van de anatomische as.

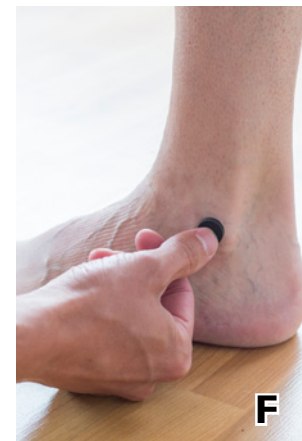

F. Markeer de laterale malleolus van de enkel



G. Markeer de mediale malleolus van de enkel.



Aandachtspunten bij het maken van de foto's

- H. Frontale foto: de hak tegen de lijn.
Voorbeeld I is foutief omdat de hak de achterlijn niet raakt.



- J. Zorg ervoor dat de voeten recht naar voren wijzen zodat alle markers zichtbaar zijn voor de frontale foto, en het been niet naar binnen of buiten is gedraaid.
Voorbeeld K is foutief omdat de voet naar buiten gedraaid is.



- L. Bij de sagittale foto: de mediale zijde van de voet tegen de lijn.
Voorbeeld M is foutief want de voet raakt de lijn niet volledig.



N. Fotografeer de frontale foto met het toestel op kniehoogte op 2 meter afstand van de muur. Houd het fototoestel verticaal. (Portret)



Zorg ervoor dat minimaal 3 van de 4 markers aan de hoeken van het raster zichtbaar zijn op de foto.

Q. Fotografeer met het toestel op kniehoogte op 2 meter afstand van de muur. Houd het fototoestel verticaal. (Sagittaal). Resultaat: R.



O. Let op dat de benen volledig in beeld zijn, van de voeten tot en met de lies.
Voorbeeld **P** is foutief want het overhemd verhult de lies.






S. Meet afstand laterale malleolus tot vloer



T. Meet afstand van mediale malleolus tot vloer

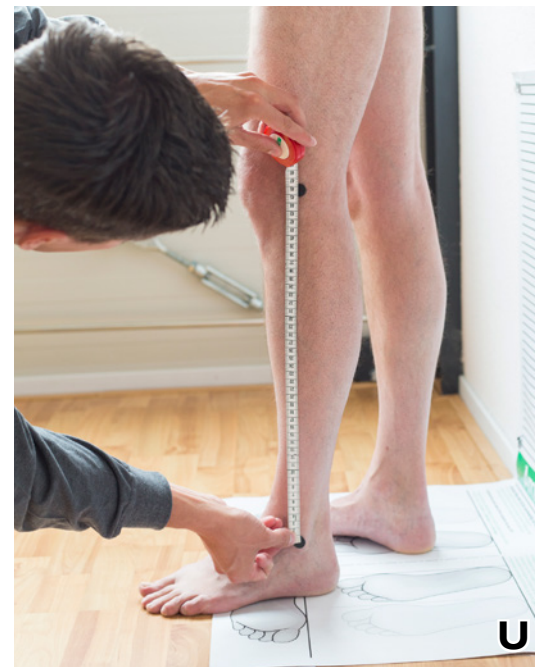

U. Meet afstand laterale malleolus van tot knieas.



V. Noteer de maten op het Genux/UTX maatname protocol.

Verstuur het formulier naar genuxorder@ambroise.nl of utxorder@ambroise.nl.



Staalsteden 4-6A, 7547 TA Enschede, Nederland
tel: +31 53 4302836 | info@ambroise.nl | www.ambroise.nl
