

# Ambroise

## **HANDLEIDING FOTOMAATNAME STATISCHE HAND/POLS SPALK (SHS)**



---

Staalsteden 4-6A, 7547 TA Enschede, Nederland  
tel: +31 53 4302836 | [info@ambroise.nl](mailto:info@ambroise.nl) | [www.ambroise.nl](http://www.ambroise.nl)  
[www.youtube.com/AmbroiseHolland](http://www.youtube.com/AmbroiseHolland) | [www.facebook.com/AmbroiseHolland](http://www.facebook.com/AmbroiseHolland)

---

## Fotomaatname voor de statische-hand/pols-spalk (SHS)


### Aandachtspunten bij de voorbereiding van een fotomaatname




A. Help de spastische hand te ontspannen.



B. Plaats de hand op het maatname plankje. De klittenbandsluiting houdt de hand op zijn plek.

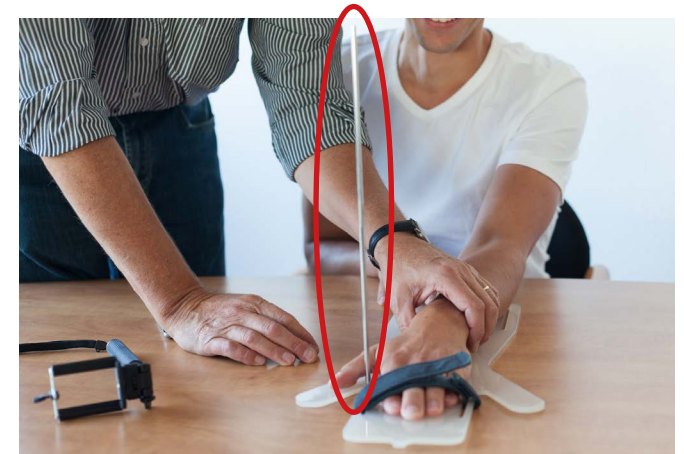

C. Plaats de pin aan de duimzijde van de hand.

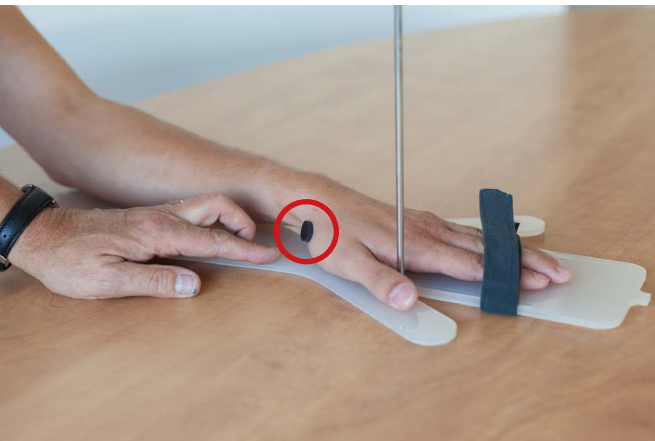

D. Plaats een marker aan ter hoogte van de radial styloid process.



E. Plaats ook een marker ter hoogte van de ulna styloid process op de pols.




F. Markeer tot slot de elleboogholte.

## Aandachtspunten bij het maken van de foto's



G. De foto's kunnen gemaakt worden als de drie markers op de arm geplaatst zijn.

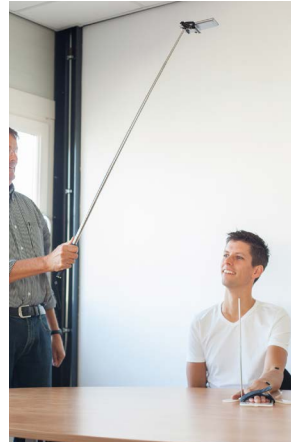

H. Maak een foto op 1 meter afstand, van recht boven de onderarm. Zorg dat alle markers zichtbaar zijn.



I. Maak op 1 meter afstand een foto van de mediale zijde van de arm. Zorg dat de mediale marker zichtbaar is en de pin in het maatnameplankje.



**. Ambroise**

Staalsteden 4-6A, 7547 TA Enschede, Nederland  
tel: +31 53 4302836 | [info@ambroise.nl](mailto:info@ambroise.nl) | [www.ambroise.nl](http://www.ambroise.nl)  
[www.youtube.com/AmbroiseHolland](http://www.youtube.com/AmbroiseHolland) | [www.facebook.com/AmbroiseHolland](http://www.facebook.com/AmbroiseHolland)

---