



HANDLEIDING DYNAMISCHE KLOMPVOETORTHESE

Twekkeler Es 24, 7547 SM Enschede, Nederland
tel: +31 53 4302836 | info@ambroise.nl | www.ambroise.nl
www.youtube.com/AmbroiseHolland | www.facebook.com/AmbroiseHolland



GEBRUIKER



PRODUCTINFORMATIE




PROFESSIONAL

DYNAMISCHE KLOMPVOETORTHESE INFORMATIE VOOR HET **GEBRUIK**

De Dykno is een spalk voor de behandeling van klompvoetjes.

WANNEER EEN DYNKO?

De DYNKO is ontwikkeld voor kinderen met aangeboren klompvoeten. Kenmerkend voor de klompvoet is dat de voet naar binnen of beneden is gekanteld in de vorm van een golfclub. Zoals in onderstaande afbeelding.

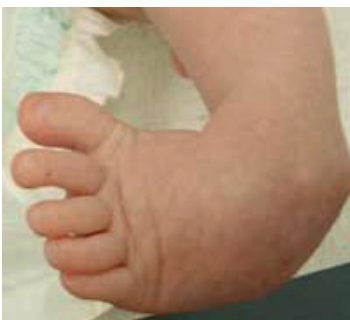

Afbeelding 1: Een klompvoet

OORZAKEN KLOMPVOETJES

De klompvoet is een aangeboren voetaandoening en komt bij ongeveer 1 op de 800 pasgeborenen voor. De oorzaak van klompvoeten is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk speelt erfelijkheid hierin een rol. Klompvoeten komen bij jongens bijna twee keer zo vaak voor als bij meisjes.

DE DYNKO

De DYNKO (een acroniem voor **DYN**amische **K**lompvoet**O**rthese) legt een dynamische koppeling aan tussen de beide voetjes. De voetjes kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen, terwijl een slim ontworpen polyurethaan veer er voor zorgt dat in rusttoestand de vereiste correctiekrachten op het enkel-voet complex worden gezet. Dit verhoogt de bewegingsvrijheid van het kind, waardoor kruipen en later zelfs wat pasjes lopen mogelijk blijft. Dit zal een positieve bijdrage leveren aan de motorische ontwikkeling van het kind. Het verende correctiesysteem zal daarbij in rust de te corrigeren structuren in de enkel en voet op spanning blijven zetten zodat tijd z'n werk kan doen om maximale correctie te realiseren. Ook als nachtsplank is de DYNKO een stuk



Afbeelding 2: De DYNKO

comfortabeler. Door de grote bewegingsvrijheid van de DYNKO is ruzie met lakentjes en dekentjes verleden tijd

BEHANDELING IS NOODZAKELIJK

Het is belangrijk dat de behandeling van de klompvoet zo snel mogelijk na de geboorte wordt gestart. De DYNKO is ontworpen om aan te sluiten bij de behandelmethode volgens Ponseti.

DYNKO SCHOENTJES

De Dykno kan gecombineerd worden met zowel Markell schoentjes als Semeda schoentjes.

WAAROM MEERDERE MATEN?

De DYNKO is verkrijgbaar in vier oplopende maten. Naarmate het kindje groeit, moet er in 3 stappen een grotere maat komen. Dit komt omdat voor optimaal resultaat de voetjes naar buiten gebracht moeten worden, ongeveer op breedte van de schouders. Daarnaast worden de spieren van het kind ook steeds sterker en moeten de veren van de DYNKO hierop aangepast worden. Daarom zijn de vier verschillende DYNKO's ontwikkeld: verschillend in maat én in veerkracht.

INFORMATIE

Wilt u meer informatie over de DYNKO? Bel ons vandaag nog op 053 - 4302836 of mail naar info@ambroise.nl

DYNAMISCHE KLOMPVOETORTHESE

PRODUCTINFORMATIE

UITVOERINGEN VAN DE DYNKO

De DYNKO is in 4 maten verkrijgbaar, waarbij de maatcode een richtlijn is voor de leeftijd van het kind in maanden

BESTELCODES

DYNKO 0-4 maanden:	350000	140
DYNKO 4-10 maanden:	350001	160
DYNKO 10-16 maanden:	350002	200
DYNKO 16+ maanden:	350003	240

h-o-h hiel bij 70
graden exorotatie

ONDERHOUD VAN DE DYNKO

De DYNKO kan worden schoongemaakt met een vochtige doek.


VERVANGEN VAN LOSSE ONDERDELEN

Het kan voorkomen dat er onderdelen van de orthese vervangen moeten worden. Deze zijn los te bestellen. Neem contact met ons op en wij sturen een vervangend onderdeel.

Bestel ongeveer 2 weken van te voren een opvolgende DYNKO maat indien nodig.



Afbeelding 3: De DYNKO, bovenaanzicht

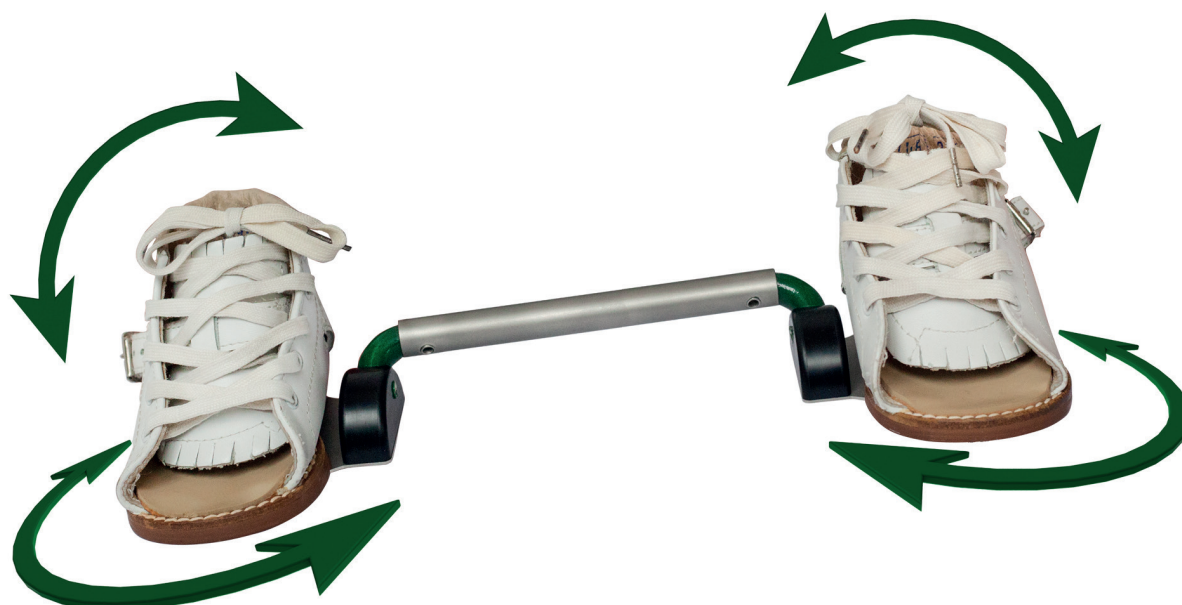

Afbeelding 4: De DYNKO

DYNAMISCHE KLOMPVOETORTHESI INFORMATIE VOOR DE PROFESSIONAL

HET PRODUCTPAKKET

1. Foamzool
2. Rubberzool
3. Laagbolkopflensschroef (M6 x 6)
4. Laagbolkopflensschroef (M6 x 10)
5. Vulplaat
6. DYNKO frame

DE PASHANDLEIDING

1. Monteer de schoenen aan het DYNKO frame.
2. Bij gebruik van **Markell schoenen** gebruikt u de korte bolkopschroeven zonder vulplaten
3. Bij gebruik van **Semeda schoenen** plaatst u eerst de vulplaat in de uitsparing van de zool en vervolgens monteert u de Dynko met de langere bolkopschroeven.
4. Verlijm de foamzool en de rubberzool onder de schoenen en werk de randen af rondom de schoenen.



Afbeelding 5: Gemonteerde schoen aan de voetplaat



6. DYNKO frame zonder schoentjes



Twekkeler Es 24, 7547 SM Enschede, Nederland
tel: +31 53 4302836 | info@ambroise.nl | www.ambroise.nl
www.youtube.com/AmbroiseHolland | www.facebook.com/AmbroiseHolland